

NOTICE D'UTILISATION



LA PLAGE
ET LA
PISCINE POUR
TOUS

UN FAUTEUIL DE BAINNADE PRATIQUE

Entièrement pliable sans aucun outil, SOFAO se glisse dans le coffre d'une voiture.



Les roues sont montées sur des axes et sont entièrement amovibles. Ensuite, il est facile de les fixer grâce à la goupille pré-installée.

La poignée avant du SOFAO permet de le déplacer sur des terrains meubles et facilite l'entrée et la sortie de l'eau.



RECOMMANDATIONS D'UTILISATION



N'oubliez pas de déployer les 4 flotteurs avant la mise à l'eau car ce sont eux qui assurent la flottaison et la stabilité !

SOFAO À LA PISCINE



Une fois les roues assemblées, on peut facilement emmener le Sofao jusqu'au lieu de baignade. Sa largeur inférieure à 80cm lui permet de franchir toutes les portes d'entrée de piscine.



Les accoudoirs sont pliants pour permettre un transfert facile du fauteuil roulant au SOFAO. Grâce au dossier réglable (5 positions), SOFAO peut être mis horizontalement pour mettre en tenue l'utilisateur ou le doucher avant d'entrer dans le bassin.



Plier et déplier SOFAO ne prend que 20 secondes et sans aucun outil ... Sa taille minimale, quand il est plié, permet un stockage facile.



Les ceintures de sécurité ne sont pas obligatoires, vous pouvez les mettre dans le dos pour les utilisateurs qui n'en ont pas besoin.



L'accompagnateur, équipé de semelles antidérapantes, peut mettre l'utilisateur à l'eau en le laissant rouler tranquillement le long du bassin. Pour la sortie de l'eau, il suffira de procéder dans l'autre sens. Pour les passagers les plus lourds, nous recommandons un accompagnateur à l'arrière et un second dans le bassin.

OPTIONS PISCINE



ROULETTE AVANT

La roulette avant pour piscine se monte à l'avant du Sofao avec une clé de 13mm. Elle facilite les manoeuvres et déplacements de l'accompagnateur une fois dans la piscine sur surfaces de type carrelage ou béton.

Le frein permet d'immobiliser le Sofao lors des transferts.

DOSSIER REGLABLE

Le dossier est réglable en 5 positions pour trouver la position appropriée. Il se règle à la main ou simplement par une simple pression de pied sur le câble situé en bas du dossier.



FLOTTEURS REGLABLES

Le niveau d'eau dans le fauteuil peut être ajusté grâce aux 4 flotteurs réglables. Pour un meilleur confort d'utilisation, les flotteurs doivent être placés au niveau des épaules. Il est toujours possible de les ajuster une fois dans l'eau



OPTIONS PLAGE

TIRE-SOFAO



Le tire - Sofao permet de tirer le Sofao sans effort sur des terrains meubles sans avoir à le lever.

PAIRE DE ROUES SUPPLEMENTAIRES



La paire de roues supplémentaires facilite le passage du Sofao sur des terrains meubles et plus particulièrement sur le sable. Se monte sans outil sur les axes de roues d'origine.

OPTION COMPLÉMENTAIRE

CALE TÊTE MULTI-POSITION



Le cale tête multi-position aide au bon maintien de la tête de l'utilisateur lors de la baignade. Le positionnement est réglable en fonction de sa taille.

UTILISATION



L'utilisateur peut se déplacer dans l'eau en effectuant quelques mouvements de bras. Si cela n'est pas possible, l'accompagnateur peut déplacer le SOFAO et son passager grâce à la poignée arrière ou à la poignée avant.

QUALITÉ

Grâce à son aluminium anodisé, sa structure en acier inoxydable poli et son tissu Batyline[®], aucun entretien particulier n'est exigé. Il est nécessaire de le rincer à l'eau après chaque utilisation, particulièrement sur les charnières.



BONNE BAIGNADE !

Sofao est un produit breveté et une marque déposée.