

Fiche d'information. Code:AA1681/2 Produit: Siège mural de douche



CE93/42EEC  
Maximum  
poids  
utilisateur  
160kg  
(25 stones)

En cas de problème  
concernant ce  
produit,  
Communiquez le  
numéro de série  
indiqué sur  
l'armature.

***DESCRIPTION:***

Le siège robuste et rembourré est en aluminium avec revêtement époxy, résistant à la corrosion. L'assise, le dossier et les accoudoirs sont généreusement rembourrés avec de la mousse cellulaire. Les accoudoirs se relèvent et s'abaissent pour faciliter le transfert latéral de la personne.

***UTILISATION:***

Ce siège permet à son utilisateur de s'asseoir confortablement et en toute sécurité lors de la toilette.

***INSTRUCTIONS D'UTILISATION:***

Pour ouvrir le siège, tirez la partie supérieure de l'assise vers le bas, puis abaissez chaque accoudoir. Les pieds se déplient automatiquement dans la bonne position. Après utilisation, tirez le siège et les bras vers le haut, dans leur position initiale. Le dispositif tient en place tout seul..

***N'OUVREZ PAS le siège en tirant sur les pieds, cela abîmerait la tige en acier inoxydable, voire les pieds eux-mêmes. La garantie n'est pas applicable si cette instruction n'est pas respectée.***

***INSTRUCTION DE FIXATION:***

Le dispositif doit être fixé à un mur porteur par un opérateur compétent et serré à l'aide de chevilles expansibles. Il est primordial que les pieds soient ajustés à la bonne hauteur avant de fixer le siège au mur. Une fois le siège fixé, les pieds doivent être placés à la vertical. Vous pouvez les ajuster individuellement en dévissant la tige enfilée et en resserrant l'écrou une fois la longueur désirée atteinte.

***POUR VOTRE SECURITE:***

Ne vous tenez pas debout sur le dispositif.  
Assurez-vous que l'utilisateur est en condition d'utiliser le produit.