




DOOVECAREGROEP

Bij storingen kunt u bellen naar

0182 – 624 990

GEbruiksaanwijzing PLATEAUWEEGSCHAAL DETECTO 6550

Uitleg van de basis knoppen op het display

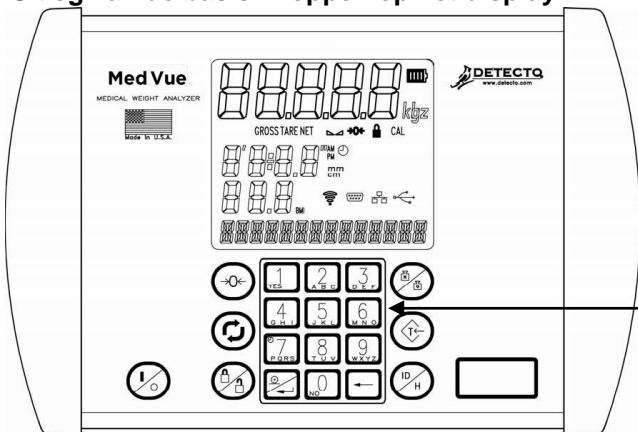

Het alfanumerieke gedeelte van de display kan worden gebruikt voor het invoeren van lengtegegevens of ID-nummers.

Om letters in te voeren drukt u meerdere keren op de knop totdat de gewenste letter wordt afgebeeld. De **0** en **1** dienen ook als **nee** en **ja**.

-  Dit is de **ON/OFF** knop. Met deze knop wordt het display aangezet. Het display gaat weer uit door nogmaals op deze knop te drukken.
-  Dit is de **ZERO** knop. Deze knop is bedoeld om de display te resetten naar nul.
-  Deze knop is bedoeld om weegeenheden te kunnen veranderen. **NB:** deze mogelijkheid moet wel zijn ingesteld gedurende de setup en ijking van de indicator.
-  Deze knop moet worden gebruikt om het display vast te zetten en weer vrij te geven. Als de "HOLD"-mogelijkheid tijdens de setup en ijking van de indicator is ingesteld, zorgt het indrukken van deze knop (na het bereiken van een stabiel gewicht) er voor dat het display het gewicht vasthoudt. Als vervolgens weer op deze knop wordt gedruwd wordt het display weer vrijgegeven en zal het display weer op nul komen te staan. Als de zogenaamde "AUTO LOCK"-mogelijkheid is ingesteld, dan zal het display direct vaststaan na het plaatsen van een gewicht op de weegschaal bereiken van een stabiel gewicht. Als vervolgens deze knop wordt ingedrukt, dan wordt het display weer vrijgegeven en zal het weer op nul komen te staan of als weer een nieuw lading is geplaatst opnieuw een nieuw gewicht vasthouden, nadat een stabiel gewicht is bereikt.


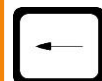
CE Fabrikant:
Detecto
203 East Daugherty
Street, P.O.Box 151
Webb City, Amerika

DOOVECAREGROEP

Bij storingen kunt u bellen naar

0182 - 624 990

BMI functies op het display

-  Dit is de **NET/GROSS** knop. Hiermee kan worden gewisseld tussen netto en bruto gewicht. Op de display gaat de bijbehorende signalering branden.
-  Dit is de **TARE** knop. Dit is de knop voor het bepalen van het TARRA-gewicht van rolstoelen e.d.
-  Dit is de **ID/HEIGHT** knop. Deze knop is bedoeld om ID-nummers in te voeren en om de lengte van de cliënt in te voeren voor de bepaling van de BMI. Om een ID-nummer op te roepen; druk op **ID/HEIGHT**, selecteer het opgeslagen nummer en druk op **TARE**.
-  Dit is de **CLEAR** knop. Deze knop is bedoeld om incorrecte ingevulde informatie op het display te verwijderen. Als er verkeerde informatie is ingevuld kan op deze knop worden gedrukt en vervolgens kunnen de correcte gegevens worden ingevuld. Bij het invullen van ID-nummers werkt deze knop als "backspace" knop.
-  Dit is de **PRINTER/ENTER** knop.

Uitleg van de basisstappen van het wegen zonder ID-nummers

1. Druk op de **ON/OFF** knop om de weegindicator aan te zetten.
2. Druk op de **ZERO** knop om een nulgewicht op het display te krijgen. De **ZERO**, **GROSS**, en **kg** signalering zal aangaan om aan te geven dat de weegschaal klaar is om te gebruiken.
3. Plaats een cliënt op de weegschaal en lees het gewicht op het display af.
4. Indien er een printer aan de weegschaal is gekoppeld, dan kan op de knop **PRINT/ENTER** worden gedrukt om een afdruk van de weging te krijgen.
5. Vervolgens kan de cliënt weer van de weegschaal worden afgehaald.

Weegschaal weer op nul zetten

1. Zorg er voor dat de weegschaal in de **GROSS** modus staat (Gross signalering op de display brandt). Druk vervolgens op de **ZERO** knop.
2. De display gaat naar nul. De **ZERO** en **STABLE** signalering zal aangaan. De weegstoel is nu weer gereed voor een volgende weeghandeling.

In de uitgebreide handleiding staan meer mogelijkheden van de weegindicator omschreven.